

TEST RAPIDI PER L'ANTIGENE COVID-19 (FLUIDO ORALE)

- 24588 TEST SALIVARE COVID - auto-test - conf. da 1
- 24590 TEST SALIVARE COVID - professionale - conf. da 20

Il Test Rapido per l'Antigene COVID-19 (Fluido Orale) è un test immunocromatografico qualitativo rapido per il rilevamento qualitativo degli antigeni nucleocapsidici (proteina N) di SARS-CoV-2 in campioni di fluido orale di individui con sospetta infezione. Kit per test monouso per determinare la presenza di coronavirus SARS-CoV-2 mediante fluido orale. Per auto-test (24588) o uso professionale (24590). La ricerca ha comprovato che il virus SARS-CoV-2 rimane a lungo stabile nel fluido orale in un ambiente caldo.

- risultati rapidi: 15 minuti
- elevata precisione
- procedura pratica
- interpretazione facile
- funzionamento semplice
- specificità relativa: 99,3%

Temperatura di conservazione: 2-30°C
Durata a scaffale*: 12 mesi (24588), 24 mesi (24590).

*Gli stock Gima possono variare da 4 a 10 mesi (24588) e da 6 a 22 mesi (24590)



24588



DOTAZIONE STANDARD

- | | |
|--|---|
| Dispositivo per il test | Foglietto illustrativo |
| Dispositivo per la raccolta del campione (imbuto, tubetto e tappo del tubetto) | Sacchetto di bio-sicurezza |
| Soluzione tampone | Scheda procedura (solo 24590). |
| | Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT |

Passo 1: Raccolta del campione
Rimuovere l'imbuto e il tubetto di plastica dalla confezione, inserire l'imbuto sul tubetto. Tossire profondamente 3-5 volte. Sputare con delicatezza il fluido orale nell'imbuto. Il fluido orale (senza bolle) dovrebbe raggiungere l'altezza indicata dalla linea di riferimento.




Passo 2: Preparazione del campione
Versare tutta la soluzione tampone nel tubetto con il fluido orale. Inserire il tappo sul tubetto. Comprimerne con delicatezza il tubetto per 10-15 volte per mescolare bene.



Passo 3: Esecuzione del test
Posizionare la cassetta del test su una superficie piana. Rovesciare il tubetto e versare 2 gocce di soluzione nel pozzetto (S) del dispositivo del test, quindi avviare il timer.



Passo 4: Leggere i risultati dopo 15 minuti.
Non interpretare i risultati dopo 20 minuti. Dopo aver completato il test, smaltire tutti i componenti del kit.

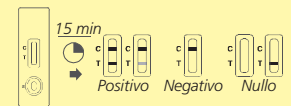

KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 - PROFESSIONALE

• 24585 KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 - conf. da 25
Kit test rapido (immunocromatografia con oro colloidale) destinato al rilevamento qualitativo degli antigeni di SARS-CoV-2 e delle sue varianti in campioni clinici (tampone nasale). Include il rilevamento delle principali varianti, riconoscendo la proteina N sulla superficie del virus.

- non invasivo, semplice da usare
- pratico, non richiede alcun dispositivo
- rapido, fornisce risultati in 15 minuti
- stabile e molto accurato
- economico e conveniente
- durata a scaffale di 18 mesi dalla data di produzione (durata a scaffale media degli stock Gima: da 4 a 16 mesi)
- condizioni di conservazione: 4~30°C.

Il kit include 25 schede test, 25 tamponi nasali, entrambi confezionati singolarmente, e 25 contagocce monouso di soluzione diluente (3 ml). Istruzioni multilingue: GB, IT, ES, PT, DE, RU.



- Hospital
- Test site
- Mass Screening
- Station
- Airport
- Hotel
- Corporation



Approvato dal Comitato per la Sicurezza Sanitaria della Commissione Europea il 17 Febbraio 2021

Risultati del test	Positivo (+)	Negativo (-)	Nulla
C: linea di controllo			
T: linea del test			

	Positivo (+)	Negativo (-)
Specificità diagnostica	92,00% (95%CI: 83,63-96,28%)	99,26% (95%CI: 95,92-99,87%)

Istruzioni per l'uso

1: raccogliere il campione con il tampone



2: staccare l'adesivo



3: inserire il tampone dal pozzetto B al pozzetto A



4: A) aggiungere 6 gocce B) ruotare il tampone, compiendo due giri in ciascuna direzione



5: ripiegare il lato sinistro sopra il destro e attendere 15 minuti



KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-COV-2 - AUTODIAGNOSI

• 24583 KIT TEST ANTIGENICO RAPIDO SARS-CoV-2 - conf. da 1

Test immunologico rapido a flusso laterale destinato all'autodiagnosi per il rilevamento qualitativo degli antigeni nucleocapsidici di SARS-CoV-2 mediante tampone nasale. La raccolta diretta del campione deve essere sempre eseguita da un adulto. Il test è destinato all'uso da parte di soggetti con sintomi o altri motivi epidemiologici per sospettare un'infezione di COVID-19. La sensibilità diagnostica e la specificità diagnostica del prodotto sono pari rispettivamente al 95,9% (90,8-98,2%) e al 100% (96,3-100,0%). Il kit include: 1 scheda test, 1 tampone nasale, 1 contagocce per singola dose; scheda di istruzioni e manuale GB, IT.

- non invasivo: inserimento 2-3 cm
- stabile e molto accurato
- rapido, fornisce risultati in 15 min
- economico

Risultati del test	Positivo (+)	Negativo (-)	Nulla
C: linea di controllo			
T: linea del test			

Linea marcata Linea tenue



24583